



MATERIALES PARA FÉRULAS

MEJORANDO
LA CALIDAD
DE LA VIDA
COTIDIANA



Orfit Industries desarrolla y produce materiales para férulas que proporcionan el mayor rendimiento posible tanto a terapeutas como a pacientes en rehabilitación física. ¡Nos hemos dedicado a esto por más de veinte años!

Somos realmente el único proveedor de servicios que inventa formulaciones termoplásticas innovadoras y que utiliza las más modernas técnicas de fabricación para producir materiales para férulas que le ofrezcan lo mejor a usted y a sus pacientes. Todos nuestros materiales para férulas son de la mayor calidad y cumplen con estándares inflexibles de seguridad y control de calidad.

Nuestra meta es proporcionarle soluciones para todas sus necesidades de ferulaje.

Todos nuestros materiales termoplásticos para férulas se desarrollan y se producen de forma interna para garantizar

que reciba exactamente lo que usted y sus pacientes necesitan. Nuestra gama de materiales elásticos y plásticos y nuestros innovadores productos "ligeros" ayudarán a resolver sus casos más complicados.

Logramos esta meta por medio de la investigación, el desarrollo y la fabricación innovadora.

Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo está dedicado al desarrollo continuo de nuevos productos, como también a la mejora de productos y aplicaciones ya existentes. Trabajamos en estrecha colaboración con los centros de rehabilitación más avanzados en todo el mundo para asegurarnos de que nuestros productos y servicios cumplan con sus requisitos.

Nuestras instalaciones de producción de vanguardia cuentan con una composición y extrusión termoplástica muy avanzada. Controlamos

cuidadosamente cada etapa de la producción debido a que esto tiene un impacto directo en la forma en que se desempeñan los materiales para férulas en su práctica diaria. Un control de calidad riguroso es crucial para asegurar que todos nuestros productos se adapten de forma ideal al propósito y a sus necesidades.

Los estándares de alta calidad reflejan nuestra forma de pensar.

Las aplicaciones de férulas en la rehabilitación física requieren precisión y durabilidad. Lo mismo se aplica a nuestro proceso de producción. Estamos comprometidos a proporcionar productos de excelente calidad que estén disponibles en los más cortos plazos de entrega. Nuestro compromiso está respaldado por el cumplimiento de los estándares ISO 9001 e ISO 13485, como así también de los estándares CE europeos, los estándares de la FDA y muchas otras normas nacionales.



REHABILITACIÓN FÍSICA

Estamos totalmente comprometidos con la seguridad y con el cuidado del medio ambiente.

Todos nuestros materiales termoplásticos se someten a pruebas de conformidad con estándares de biocompatibilidad estrictos. Están exentos de látex y son biodegradables. Cumplimos con los estándares ambientales más rigurosos a lo largo del proceso de producción. Y no nos detenemos ahí. Toda la documentación de nuestros productos se imprime en papel que no daña el medio ambiente. Cumplimos con los principios de "Impresión de bajo impacto".

Estamos comprometidos con la excelencia en la educación relativa a las férulas.

A Orfit Industries le complace ofrecer su asistencia ante todas las preguntas sobre férulas que usted pueda tener y todas las

inquietudes de los pacientes.

Además, también ofrecemos talleres de férulas de alta calidad para promover la excelencia en materia de educación sobre férulas. Podemos personalizar un taller básico, intermedio o avanzado para sus instalaciones u organización. También ofrecemos tarifas especiales para programas de terapia ocupacional. Por favor, comuníquese con nosotros hoy mismo para programar una capacitación gratuita que le permita conocer más sobre nuestros productos o para planificar un taller de férulas.

¡Tenemos respuestas para sus preguntas más difíciles sobre férulas y tenemos consejos y trucos que harán que la ferulización sea divertida!

CONTENIDO

Cinta termoplástica Orficast™: azul + negra	4
Orfit® Classic	8
Orfit® NS (antiadherente)	10
Aquafit™ NS	12
Orflight® + Orflight® Negra NS	14
Orflight® Azul Atómica NS	16
Orfit® Colores NS	18
PRECORTADAS:	
Orfit® Colores NS Precortada	20
Orfit® Classic Precortada	22
Tiras Orfit®	
Orfit® Eco	26
Orfit® Eco Negra NS	28
Tecnofit®	30
Orfibrace™	32
Orfit® Flex	34
Orfit® Ease	36
Allfit	38
Orfizip® NS+ Orfizip® Negra NS	40
Orfizip®	42
Dynasyst™	44
Cinta de gancho y bucle	47
Almohadillado y forro	49
Accesorios	50
Calentador Seco	53
Recursos de ayuda de instrucciones sobre férulas	54
Instrucciones de uso	55
+ Instrucciones de mantenimiento	
Propiedades de los materiales	56
Encuentre Orfit en línea	58

EXTREMADAMENTE
CÓMODA PARA
SU PACIENTE



ORFICAST™ es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

CINTA TERMOPLÁSTICA ORFICAST™

CARACTERÍSTICAS

Tela tejida termoplástica en un rollo.

Se presenta en diferentes anchos y colores.

Excelente elasticidad en dos direcciones.

Excelente memoria (longitudinal).

Material de tela fina y transpirable.

Se corta fácilmente.

Capacidad autoadhesiva, especialmente bajo calor seco.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

El rollo de cinta permite el uso de una técnica de envoltura y moldeado circunferencial. Ahorra tiempo. No es necesario hacer un molde.

Ancho(s) del tamaño perfecto para ortesis pequeñas y grandes. Puede ajustarse a dedos de diferentes tamaños y diseños ortésicos diferentes.

Permite que el modelado preciso se adapte a la anatomía del paciente, por ejemplo, el espacio interdigital.

Las ortesis se pueden remodelar cuando se necesite una corrección. Evita el desperdicio de material.

Sensación suave al tacto y bordes lisos. Ligera. Permite la ventilación. Previene la maceración de la piel. Excelente comodidad y aceptación en el paciente.

Permite cortar fácilmente trozos pequeños para utilizarlos como refuerzo de las ortesis cuando se desee.

Las costuras superpuestas no se perciben desde adentro. La aplicación de capas múltiples aumenta la rigidez y la estabilidad de las ortesis.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Ideal para el uso en caso de afecciones traumáticas u ortopédicas que requieran ortesis para una inmovilización rápida y sencilla. También se recomienda como un producto de primeros auxilios en salas de enyesados y quirófanos.

Todos los tipos de ortesis para inmovilización de dedos y ortesis con base en la mano para muñeca y pulgares.

Un modelado preciso y un ajuste cómodo previenen los puntos de presión.

Permite fabricar ortesis estáticas progresivas para recuperar la amplitud del movimiento.

Su uso también se recomienda para pieles frágiles, por ejemplo, para pacientes que sufren de una afección poliartrítica.

La fabricación de ortesis más grandes precisará calor seco para adherirse.

Las costuras de superposición que son visibles por fuera no son perceptibles por dentro, lo que le concede a ORFICAST™ una superficie con una sensación muy suave al tacto.

CINTA TERMOPLÁSTICA ORFICAST™ AZUL	
N.º de art.	Descripción
4030	1 rollo – ancho: 3 cm, largo: 3 m
4031	1 caja con 12 rollos – ancho: 3 cm, largo: 3 m
4032	1 rollo – ancho: 6 cm, largo: 3 m
4033	1 caja con 6 rollos – ancho: 6 cm, largo: 3 m



Estados Unidos: Solicitud de patente n.º 12/212,124 presentada el 17 de septiembre de 2008
Publicado el 19 de marzo de 2009 en la publicación n.º 2009/0075542

UE: Solicitud de patente n.º 08164533.5 presentada el 17 de septiembre de 2008
Publicado el 22 de abril de 2009 con el n.º 2050848



ORFICAST™ es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

CINTA TERMOPLÁSTICA ORFICAST™

FÉRULA CIRCULAR PARA DEDO



1 Active ORFICAST™ en agua a 65 °C (149 °F) durante 1 minuto. También es posible aplicar calor seco.



2 Seque levemente el ORFICAST™. La cinta también se puede aplicar en condiciones húmedas.



3 Aplique en forma circular desde la zona distal hasta la proximal. Estire el material levemente durante la aplicación.



4 Superponga el material durante el plegado. Asegúrese de que lo superpuesto no cubra más de la mitad del tamaño del ancho total de la cinta ORFICAST™.



5 Acabado: Aplique calor seco o húmedo a los bordes y pliegue hacia abajo suavemente. El material comprimido da como resultado una adherencia permanente. Material no comprimido: No hay una adherencia permanente (es posible aflojar las capas).



6 Fijación de la cinta de bucle: Aplique calor seco a ORFICAST™ en forma local con aire caliente y presione firmemente hasta comprimir.

FÉRULA PARA PULGAR



1 Active ORFICAST™ en agua a 65 °C (149 °F) durante 1 minuto. También es posible aplicar calor seco.



2 Aplicación: aplique en forma circular desde la zona distal hasta la proximal. Estire el material levemente durante la aplicación.



3 Superponga el material durante el plegado. Asegúrese de que lo superpuesto no cubra más de la mitad del tamaño del ancho total de la cinta ORFICAST™.



4 Moldee el material sobre el lado de la palma para que se adapte a la anatomía y los arcos de la mano.



5 Moldee el material desde el lado cubital hasta el lado radial, sobre la parte dorsal de la mano y nuevamente hacia el pulgar y de forma similar envuélvalo alrededor de la mano.



6 Acabado: Aplique calor húmedo o seco a los bordes y pliegue hacia abajo suavemente.

CINTA TERMOPLÁSTICA ORFICAST™


NEGRO

N.º de art.	Descripción
4030Z	1 rollo – ancho: 3 cm, largo: 3 m
4031Z	1 caja con 12 rollos – ancho: 3 cm, largo: 3 m

N.º de art.	Descripción
4032Z	1 rollo – ancho: 6 cm, largo: 3 m
4033Z	1 caja con 6 rollos – ancho: 6 cm, largo: 3 m

A woman with long, wavy brown hair is looking off to the side with a thoughtful expression. She is wearing a blue short-sleeved button-down shirt over a white top. She is also wearing white, perforated, fingerless gloves. She is holding a white clipboard with both hands.

MANEJO DE ALTO RENDIMIENTO

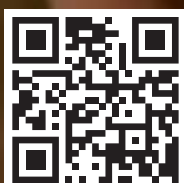

ORFIT® CLASSIC

CARACTERÍSTICAS

Transparente al activarse.

Material no recubierto.

Excelente elasticidad (1000%) sin rasgarse.

Memoria elástica total (100%).

Bordes fáciles de recortar.

Disponible en versión de elasticidad alta ("blanda") y en versión de elasticidad baja ("rígida").

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

La transparencia indica el momento en que el material está listo para moldearse. Permite una alineación adecuada y un monitoreo visual sobre los puntos de referencia anatómicos.

Adherencia temporal durante la fabricación de la férula y unión permanente por medio del uso de calor seco. La adhesividad ayuda a que la ortesis se quede en su lugar durante la fabricación. Todos los accesorios y soportes se pueden adherir fácilmente.

Su moldeado muy preciso se adapta a la anatomía del paciente, por ejemplo, en los arcos de la mano y el primer espacio interdigital. El moldeado exacto mejora la correcta distribución de presión sobre la piel.

Completamente remodelable y se puede ajustar con facilidad después de recalentarse en forma local.

Evita el desperdicio de material.

Extrema comodidad para el paciente.

La versión "blanda" presenta una menor resistencia al estiramiento y una mayor capacidad de moldeado. La versión "rígida" presenta una mayor resistencia al estiramiento y una menor capacidad de moldeado.


APLICACIONES RECOMENDADAS

Potencial ilimitado para la fabricación de todos los tamaños de férulas con cuidado y prevención adicionales de puntos de presión. Excelente como base para diferentes accesorios.

Se recomienda la versión "blanda" para: ortesis para el dedo meñique, ortesis para pulgares, ortesis para manos en reposo, ortesis para muñeca y muñeca/pulgar y diseños circunferenciales.

Se recomienda la versión "rígida" para: ortesis grandes, ortesis largas para brazos, ortesis para tobillo-pie, y refuerzo de fracturas y antiestático.

ORFIT® CLASSIC BLANDA		material laminado	
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	45 cm x 60 cm • 17 1/16" x 23 5/8"	60 cm x 90 cm • 23 5/8" x 35 3/8"
1.6 mm - 1/16"	no perfo	8332.SO1	
	micro perfo	8332.SO2	
2.0 mm - 1/12"	no perfo	8333.SO1	
	micro perfo	8333.SO2	
	micro plus perfo	8333.SO2+	
	maxi perfo	8333.SO3	
	mini perfo	8333.SO4	
2.5 mm - 3/32"	micro perfo	8338.SO2	
3.2 mm - 1/8"	no perfo	8334.SO1	8354.SO1
	maxi perfo	8334.SO3	8354.SO3
	mini perfo	8334.SO4	8354.SO4
4.2 mm - 3/16"	no perfo		8355.SO1
	mini perfo		8355.SO4
ORFIT® CLASSIC RÍGIDA		material laminado	
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	45 cm x 60 cm • 17 1/16" x 23 5/8"	60 cm x 90 cm • 23 5/8" x 35 3/8"
3.2 mm - 1/8"	no perfo	8334.ST1	8354.ST1
	mini perfo	8334.ST4	8354.ST4
4.2 mm - 3/16"	no perfo		8355.ST1
	mini perfo		8355.ST4

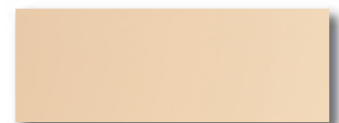

NO PERFO



MINI PERFO



MAXI PERFO



MICRO PERFO



MICRO PLUS PERFO

A woman with long brown hair, wearing a white lab coat, is sitting and looking down at a smartphone. She is wearing a white, textured, sleeveless brace on her right forearm. The background is a bright, out-of-focus interior with vertical light patterns.

REVESTIDA PARA
UNA MAYOR
FACILIDAD
DE USO



ORFIT® NS (ANTIADHERENTE)

CARACTERÍSTICAS

Transparente al activarse.

Excelente elasticidad (1000%) sin rasgarse.

Material recubierto antiadherente.

Memoria elástica total (100%).

Bordes fáciles de recortar.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

La transparencia indica el momento en que el material está listo para moldearse. Permite una alineación adecuada y un monitoreo visual sobre los puntos de referencia anatómicos.

Su moldeado muy preciso se adapta a la anatomía del paciente, por ejemplo, en los arcos de la mano y el primer espacio interdental. El moldeado exacto mejora la correcta distribución de presión sobre la piel.

No permite uniones accidentales. El recubrimiento permite una unión temporal durante la fabricación. Es posible una unión permanente y confiable después de retirar el recubrimiento y usar calor seco. Todos los accesorios y soportes se pueden aplicar con máxima facilidad. Evita que el material se adhiera a las vendas o al forro de algodón.

Completamente remodelable y se puede ajustar con facilidad después de recalentarse en forma local. Evita el desperdicio de material.

Extrema comodidad para el paciente.


APLICACIONES RECOMENDADAS

Potencial ilimitado para la fabricación de ortesis muy grandes o muy pequeñas.

El recubrimiento antiadherente permite un moldeado directo sobre las vendas y los forros de algodón en condiciones posquirúrgicas.

Excelente material para la fabricación de máscaras de presión con exterior rígido usadas para garantizar una excelente cicatrización en el tratamiento de pacientes con quemaduras.

ORFIT® NS (ANTIADHERENTE) BLANDA			material laminado
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	45 cm x 60 cm • 17 1/16" x 23 5/8"	60 cm x 90 cm • 23 5/8" x 35 3/8"
1.6 mm - 1/16"	no perfo	8332.S01/NS	
	micro perfo	8332.S02/NS	
2.0 mm - 1/12"	no perfo	8333.S01/NS	
	micro perfo	8333.S02/NS	
	micro plus perfo	8333.S02+/NS	
	maxi perfo	8333.S03/NS	
	mini perfo	8333.S04/NS	
2.5 mm - 3/32"	micro perfo	8338.S02/NS	
3.2 mm - 1/8"	no perfo	8334.S01/NS	8354.S01/NS
	maxi perfo	8334.S03/NS	8354.S03/NS
	mini perfo	8334.S04/NS	8354.S04/NS
4.2 mm - 3/16"	no perfo		8355.S01/NS
	mini perfo		8355.S04/NS
ORFIT® NS (ANTIADHERENTE) RÍGIDA			material laminado
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	45 cm x 60 cm • 17 1/16" x 23 5/8"	60 cm x 90 cm • 23 5/8" x 35 3/8"
3.2 mm - 1/8"	non perfo	8334.ST1/NS	8354.ST1/NS
	mini perfo	8334.ST4/NS	8354.ST4/NS
4.2 mm - 3/16"	non perfo		8355.ST1/NS
	mini perfo		8355.ST4/NS

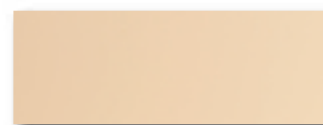

NO PERFO



MINI PERFO



MAXI PERFO




MICRO PERFO



MICRO PLUS PERFO

A woman with long, wavy blonde hair is sitting and working on a laptop. She is wearing a dark long-sleeved top and a white wristband on her left wrist. The background is a bright, out-of-focus indoor space with large windows and a green plant.

LA BELLEZA DEL BLANCO CRISTALINO

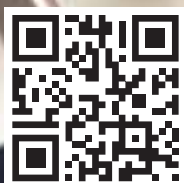

AQUAFIT™ es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

AQUAFIT™ NS

CARACTERÍSTICAS

Transparente al activarse.

Excelente elasticidad (1000%) sin rasgarse.

Material recubierto antiadherente.

Excelente memoria elástica (100%).

Bordes fáciles de recortar.

Disponible en versión de elasticidad alta ("blanda") y en versión de elasticidad baja ("rígida").

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

La transparencia indica el momento en que el material está listo para moldearse. Permite una alineación adecuada y un monitoreo visual sobre los puntos de referencia anatómicos.

Su moldeado muy preciso se adapta a la anatomía del paciente, por ejemplo, en los arcos de la mano y el primer espacio interdigital. El moldeado exacto mejora la correcta distribución de presión sobre la piel.

No permite uniones accidentales. El recubrimiento permite una unión temporal durante la fabricación. Es posible una unión permanente y confiable después de retirar el recubrimiento y usar calor seco. Todos los accesorios y soportes se pueden aplicar con una máxima facilidad. Superficie blanca brillante estéticamente agradable. Evita que el material se adhiera a las vendas o al forro de algodón.

Completamente remoldeable y se puede ajustar con facilidad después de recalentarse en forma local. Evita el desperdicio de material.

Extrema comodidad para el paciente.

La versión "blanda" presenta una menor resistencia al estiramiento y una mayor capacidad de moldeado. La versión "rígida" presenta una mayor resistencia al estiramiento y una menor capacidad de moldeado.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Potencial ilimitado para la fabricación de ortesis muy grandes o muy pequeñas y de ortesis para las extremidades inferiores.


"Blandas": Ortesis para dedo meñique, ortesis para pulgar, ortesis para mano, muñeca, muñeca/pulgar, ortesis para codo, collares cervicales, ortesis para dedo del pie.

"Rígidas": ortesis grandes, ortesis largas para brazos, ortesis para tobillo-pie, y refuerzo de fracturas (si se aplica en forma circunferencial).

El recubrimiento antiadherente permite un moldeado directo sobre las vendas y los forros de algodón en condiciones posquirúrgicas.

Excelente material para la fabricación de máscaras de presión con exterior rígido usadas para garantizar una excelente cicatrización en el tratamiento de pacientes con quemaduras.

AQUAFIT® NS (ANTIADHERENTE) BLANDA			material laminado
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	45 cm x 60 cm • 17 11/16" x 23 5/8"	60 cm x 90 cm • 23 5/8" x 35 3/8"
1.6 mm - 1/16"	no perfo	8632N.1/NS	
	micro perfo	8632N.2/NS	
2.4 mm - 3/32"	no perfo	8639N.1/NS	
	micro plus	8639N.2+/NS	
3.2 mm - 1/8"	no perfo	8634N.1/NS	
	macro perfo	8634N.6/NS	
	maxi perfo	8634N.3/NS	
	no perfo		8654N.1/NS
	macro perfo		8654N.6/NS
AQUAFIT® NS (ANTIADHERENTE) RÍGIDA			material laminado
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	45 cm x 60 cm • 17 11/16" x 23 5/8"	60 cm x 90 cm • 23 5/8" x 35 3/8"
3.2 mm - 1/8"	no perfo	8634N.ST1/NS	8654N.ST1/NS
	macro perfo	8634N.ST6/N	8654N.ST6/NS

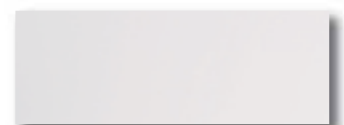

NO PERFO




MACRO PERFO



MAXI PERFO




MICRO PERFO

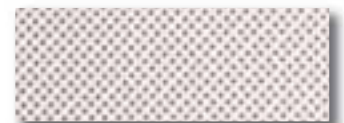

MICRO PLUS PERFO

A woman with blonde hair and glasses, wearing a white polo shirt, is smiling and looking down at a white envelope she is holding. She is wearing a black, textured, sleeve-like brace on her left forearm, which has pink circular accents. The background is a blurred outdoor setting with greenery.

HASTA 30% MÁS
LIGERO QUE
OTROS MATERIALES
PARA FÉRULAS

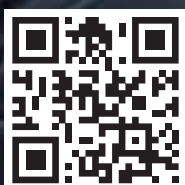

ORFILIGHT® Y ORFILIGHT® NEGRA NS

CARACTERÍSTICAS

Pesa de 25% a 30% menos que otros materiales.

Excelente estiramiento, elasticidad lenta.

Máxima elasticidad sin rasgarse.

Memoria moderada.

Suave sensación aterciopelada y bordes fáciles de recortar.

Orfilight Beige no está revestida.

Orfilight Negra NS tiene un revestimiento antiadherente.

Disponible también en forma precortada.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Crea ortesis ligeras, incluso en el caso de diseños de equipos muy grandes.

Fácil moldeado de la ortesis a la anatomía.

Manejo fácil y control perfecto del material durante el moldeado. Permite estirar el material lo suficiente para posicionar el material en forma correcta y mantenerlo en su lugar durante la fabricación.

El material es completamente remoldeable.

Mayor comodidad para el paciente.

Se adhiere a sí misma fácilmente. Todos los accesorios y soportes se pueden adherir con máxima facilidad.

Evita que el material se adhiera a las vendas o al forro de algodón.

Ahorra tiempo. Evita el desperdicio de material.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Excelente selección de material para todos los tipos de ortesis pequeñas, medianas y grandes.

Especialmente recomendado para pacientes con pérdida de fuerza, por ejemplo, adultos mayores, y para tratamientos pediátricos y reumáticos.

Base ligera para todos los accesorios.

Material ideal de ferulización para fabricar ortesis posquirúrgicas.

ORFILIGHT®			precortada
Descripción	Tamaño	Material	N.º de art.
Férula para deslizamiento del tendón flexor	pequeña	2,5 mm - 3/32" micro perfo	35843/L
	mediana	3,2 mm - 1/8" mini perfo	35844/L
	grande		35845/L
Férula posterior para pulgar	pequeña	1,6 mm - 1/16" micro perfo	35810/L
	mediana		35811/L
	grande		35812/L
Férula inmovilizadora de la zona dorsal de la muñeca	extra pequeña	3,2 mm - 1/8" no perfo	35818/L
	pequeña		35820/L
	mediana		35821/L
	grande		35822/L

ORFILIGHT®			material laminado
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	45 cm x 60 cm • 17 11/16" x 23 5/8"	
1,6 mm - 1/16"	micro perfo	8332.2/L	
2,5 mm - 3/32"	micro perfo	8338.2/L	
3,2 mm - 1/8"	no perfo	8334.1/L	
	mini perfo	8334.4/L	

ORFILIGHT® NEGRA NS (ANTIADHERENTE)			precortada
Descripción	Tamaño	Material	N.º de art.
Férula posterior para pulgar	pequeña	1,6 mm - 1/16" micro perfo	35810Z/L/NS
	mediana		35811Z/L/NS
	grande		35812Z/L/NS
Férula para muñeca+pulgar	pequeña	2,5 mm - 3/32" micro perfo	35814Z/L/NS
	mediana		35815Z/L/NS
	grande		35816Z/L/NS
Férula inmovilizadora de la zona dorsal de la muñeca	pequeña	3,2 mm - 1/8" no perfo	35820Z/L/NS
	mediana		35821Z/L/NS
	grande		35822Z/L/NS

ORFILIGHT® NEGRA NS (ANTIADHERENTE)			material laminado
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	45 cm x 60 cm • 17 11/16" x 23 5/8"	
1,6 mm - 1/16"	micro perfo	8332Z.2/L/NS	
2,5 mm - 3/32"	micro perfo	8338Z.2/L/NS	
3,2 mm - 1/8"	no perfo	8334Z.1/L/NS	
	mini perfo	8334Z.4/L/NS	




Férula para deslizamiento del tendón flexor



Férula posterior para pulgar



Férula inmovilizadora de la zona dorsal de la muñeca

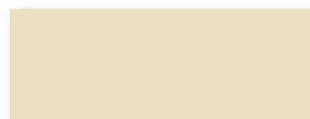

NO PERFO



MINI PERFO



MICRO PERFO



ORFILIGHT® AZUL ATÓMICA NS

CARACTERÍSTICAS

Pesa entre un 25 % y un 30 % menos que otros materiales.

Excelente extensión, elasticidad moderada.

Se estira al máximo sin romperse.

Memoria moderada.

Superficie suave con tacto de terciopelo y fácil de recortar.

Orfilight Azul Atómica NS tiene un recubrimiento antiadherente.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Crea ortesis ligeras, incluso en casos de diseños de aparatos muy grandes.

Moldeo fácil de ortesis según la anatomía.

Fácil manipulación y perfecto control del material durante el moldeo. Permite ser estirado lo suficiente con el fin de colocar el material correctamente y mantenerlo en su lugar durante la fabricación de la férula.

El material se puede volver a modelar completamente.

Aumenta la comodidad del paciente.

Evita que el material se pegue en vendajes o forros de algodón.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Material excelente para todo tipo de ortesis, pequeñas, medianas y grandes.

Especialmente recomendado para los pacientes con pérdida de fuerza y/o piel frágil o sensible, por ejemplo, para personas mayores, y personas en tratamiento pediátrico y reumático.

Base ligera para todo tipo de accesorios.

Material de férula ideal para fabricar ortesis post-quirúrgicas.

ORFILIGHT® AZUL ATÓMICA NS		material laminado
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	45 cm x 60 cm • 17 11/16" x 23 5/8"
1,6mm - 1/16"	micro perfo	8332MB.2/L/NS
2,5 mm - 3/32"	micro perfo	8338MB.2/L/NS
3,2 mm - 1/8"	no perfo	8334MB.1/L/NS
	mini perfo	8334MB.4/L/NS



NO PERFO




MINI PERFO



MICRO PERFO



COLORES
FASCINANTES PARA
SUS NECESIDADES
DE FÉRULAS

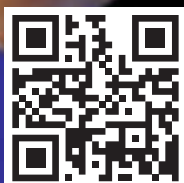

ORFIT® COLORES NS

CARACTERÍSTICAS

Paleta de pintor única con colores metálicos y fuertes y con un agradable acabado brillante de superficie.

Material recubierto antiadherente.

Excelente elasticidad (1000%) sin rasgarse.

Excelente memoria elástica.

Bordes fáciles de recortar.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Una amplia gama de colores satisface las preferencias personales de cada paciente, especialmente de niños y de atletas. Junto con muchos otros factores favorables, esto mejorará el cumplimiento por parte del paciente.

El recubrimiento permite una unión temporal durante la fabricación. Es posible una unión permanente y confiable después de retirar el revestimiento y usar calor seco. Todos los accesorios y soportes se pueden aplicar con máxima facilidad.

Superficie estéticamente agradable. Evita que el material se adhiera a las vendas u al forro de algodón.

Su moldeado muy preciso se adapta a la anatomía del paciente, por ejemplo, en los arcos de la mano y el primer espacio interdigital. El moldeado exacto mejora la correcta distribución de presión sobre la piel.

Completamente remoldeable y se puede ajustar con facilidad después de recalentarse en forma local. Evita el desperdicio de material.

Extrema comodidad para el paciente.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Potencial ilimitado para la fabricación de ortesis muy grandes o muy pequeñas:

- Ortesis para dedo meñique,
- Ortesis para pulgar
- Ortesis para mano,
- Muñeca,
- Muñeca/pulgar,
- Ortesis para codo,
- Collarines cervicales,
- Ortesis para dedo del pie,
- Soportes para fractura (si se aplica en forma circunferencial)

Se pueden usar tiras pequeñas como agradables y coloridas tiras para bordes.



ORFIT® COLORES NS (ANTIADHERENTE) COLORES					material laminado	
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	45 cm x 60 cm • 17 11/16" x 23 5/8"				
		violeta	verde brillante	negro dominante	rojo dinámico	azul océano
2.0 mm - 1/12"	no perfo	8133PU.1/NS	8133GR.1/NS	8133Z.1/NS	8133R.1/NS	8133B.1/NS
	micro perfo	8133PU.2/NS	8133GR.2/NS	8133Z.2/NS	8133R.2/NS	8133B.2/NS
ORFIT® COLORES NS (ANTIADHERENTE) COLORES METÁLICOS					material laminado	
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	45 cm x 60 cm • 17 11/16" x 23 5/8"				
		plateado sónico	azul atómico		dorado	
2.0 mm - 1/12"	no perfo	8133MG.1/NS	8133MB.1/NS		8133GO.1/NS	
	micro perfo	8133MG.2/NS	8133MB.2/NS		8133GO.2/NS	
3.4 mm - 1/8"	no perfo	8134MG.1/NS	8134MB.1/NS		8134GO.1/NS	
	mini perfo	8134MG.4/NS	8134MB.4/NS		8134GO.4/NS	



NO PERFO



MINI PERFO



MICRO PERFO



ORFIT® COLORES NS
AHORA DISPONIBLE EN
VERSIÓN PRECORTADA



ORFIT® es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

ORFIT® COLORES NS PRECORTADAS

CARACTERÍSTICAS

Paleta de pintor única con colores metálicos y fuertes y con un agradable acabado brillante de superficie.

Material recubierto antiadherente.

Excelente elasticidad (1000%) sin rasgarse.

Excelente memoria elástica.

Bordes fáciles de recortar.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Una amplia gama de colores satisface las preferencias personales de cada paciente, especialmente de niños y de atletas. Junto con muchos otros factores favorables, esto mejorará el cumplimiento por parte del paciente.

El recubrimiento permite una unión temporal durante la fabricación. Es posible una unión permanente y confiable después de retirar el recubrimiento y usar calor seco. Todos los accesorios y soportes se pueden aplicar con máxima facilidad. Superficie estéticamente agradable.

Evita que el material se adhiera a las vendas o al forro de algodón. Su moldeado muy preciso se adapta a la anatomía del paciente, por ejemplo, en los arcos de la mano y el primer espacio interdigital. El moldeado exacto mejora la correcta distribución de presión sobre la piel.

Completamente remoldeable y se puede ajustar con facilidad después de recalentarse en forma local. Evita el desperdicio de material.

Extrema comodidad para el paciente. Se puede adaptar a todos los tamaños de muñeca.

Óptima ventilación de la piel.

Ahorra tiempo.

Se puede ajustar la longitud.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Excelente elección para fabricar las siguientes ortesis de mano:
Pulgar con base en la mano,
Pulgar completo,
Muñeca,
Muñeca/pulgar.

**Férula posterior tipo guante para pulgar
Azul atómico**



**Férula de pulgar completo
Azul océano**



**Férula de inmovilización tipo guante
Plateado sónico**



**Férula para muñeca+pulgar
Negro dominante**



FÉRULA POSTERIOR TIPO GUANTE PARA PULGAR

Tamaño	Azul océano	Azul atómico	Plateado sónico	Negro dominante
S (pequeño)	35810B/NS	35810MB/NS	35810MG/NS	35810Z/NS
M (mediano)	35811B/NS	35811MB/NS	35811MG/NS	35811Z/NS
L (grande)	35812B/NS	35812MB/NS	35812MG/NS	35812Z/NS

FÉRULA DE PULGAR COMPLETO

Tamaño	Azul océano	Azul atómico	Plateado sónico	Negro dominante
S (pequeño)	35900B/NS	35900MB/NS	35900MG/NS	35900Z/NS
M (mediano)	35901B/NS	35901MB/NS	35901MG/NS	35901Z/NS
L (grande)	35902B/NS	35902MB/NS	35902MG/NS	35902Z/NS

FÉRULA PARA MUÑECA+PULGAR

Tamaño	Azul océano	Azul atómico	Plateado sónico	Negro dominante
S (pequeño)	35830B/NS	35830MB/NS	35830MG/NS	35830Z/NS
M (mediano)	35831B/NS	35831MB/NS	35831MG/NS	35831Z/NS
L (grande)	35832B/NS	35832MB/NS	35832MG/NS	35832Z/NS


FÉRULA DE INMOVILIZACIÓN TIPO GUANTE

Tamaño	Azul océano	Azul atómico	Plateado sónico	Negro dominante
S (pequeño)	35814B/NS	35814MB/NS	35814MG/NS	35814Z/NS
M (mediano)	35815B/NS	35815MB/NS	35815MG/NS	35815Z/NS
L (grande)	35816B/NS	35816MB/NS	35816MG/NS	35816Z/NS




MEDICIÓN:

Mida el ancho total de la mano en las articulaciones MCP

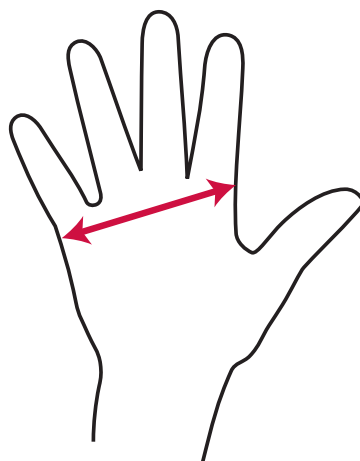

60-70 mm - $2 \frac{1}{5}$ " - $2 \frac{3}{4}$ " = **pequeña**
 80-90 mm - $3 \frac{1}{8}$ " - $3 \frac{1}{2}$ " = **mediana**
 100-110 mm - 4 " - $4 \frac{3}{10}$ " = **grande**

FÉRULA POSTERIOR TIPO GUANTE PARA PULGAR

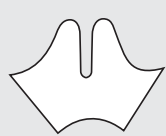

35810 (pequeña)
 35811 (mediana)
 35812 (grande)

(1,6 mm - 1/16" micro perfo, blanda)

Esta férula proporciona una inmovilización extremadamente cómoda y una estabilización de la columna completa del pulgar. Puede servir para el tratamiento de tenosinovitis, artritis reumatoide, osteoartritis de la articulación basal, esguince de pulgar y manejo pre y posoperatorio del pulgar.

FÉRULA DE PULGAR COMPLETO



35900 (pequeña)
 35901 (mediana)
 35902 (grande)

(2,0 mm - 1/12" micro perfo, blanda)

Destinada a casos agudos. La parte dorsal a la altura del pulgar previene la hiperextensión de la falange distal. Esta parte se puede cortar fácilmente cuando sea necesario retirarla.

FÉRULA PARA MUÑECA+PULGAR




35814 (pequeña)
 35815 (mediana)
 35816 (grande)

(2,0 mm - 1/12" micro perfo, blanda)

Una inmovilización tradicional de muñeca y pulgar para inflamaciones muy agudas de articulaciones y tendón. Esta férula proporciona total comodidad gracias a su diseño circunferencial y su palanca larga.

FÉRULA DE INMOVILIZACIÓN TIPO GUANTE

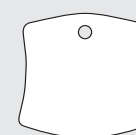

35830 (pequeña)
 35831 (mediana)
 35832 (grande)

(2,0 mm - 1/12" micro perfo, blanda)

Una férula de inmovilización completa para la muñeca. Debido a su peso ligero y su tamaño pequeño, es muy cómoda, proporciona mucho soporte y además es extremadamente fuerte y durable.

ORFIT® CLASSIC PRECORTADAS – FÉRULAS PARA MANO

FÉRULA INMOVILIZADORA DE LA ZONA DORSAL



35818 (extra pequeña)
35820 (pequeña)
35821 (mediana)
35822 (grande)

(3,2 mm - 1/8" no perfo, rígida)

Una férula muy funcional para la mayoría de las molestias de la muñeca, especialmente para parálisis flácida. Muy adecuada como férula básica para recibir soportes de extensión de bajo perfil. Fabricada en 4 tamaños, uno de los cuales es para niños (ancho de mano: 40-50 mm).

FÉRULA PARA MANO EN REPOSO INTRÍNSECO



35850 (pequeña)
35851 (mediana)
35852 (grande)

(3,2 mm - 1/8" no perfo, blanda)

Un diseño de férula para el manejo de varios problemas de mano.

FÉRULA ANTIESPÁSTICA + ACCESORIO PARA PULGAR



35870 (pequeña)
35871 (mediana)
35872 (grande)

(3,2 mm - 1/8" no perfo, rígida)

El objetivo de esta férula es mantener los músculos flexores anteroposteriores y laterolaterales de muñeca y dedos para inhibir la hipertonía.

FÉRULA ANTIESPÁSTICA INTRÍNSECA DE MANO



35910 (pequeña)
35911 (mediana)
35912 (grande)

(3,2 mm - 1/8" mini perfo, rígida)

Esta férula tiene una barra radial para proporcionar fuerza adicional en el lado radial de la férula, ideal para pacientes con espasticidad.

FÉRULA DE REPOSO PARA ARTRITIS REUMATOIDE




35840 (pequeña)
35841 (mediana)
35842 (grande)

(3,2 mm - 1/8" no perfo, blanda)

Un diseño específico para ferulaje preventivo y correctivo de la mano reumatoide estereotipo. Tanto las deformidades anteroposteriores y laterolaterales de muñeca y dedos como las deformidades de los pulgares se realinean fácilmente.

FÉRULA PARA DESVIACIÓN CUBITAL

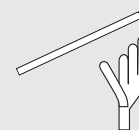


35817KL (izquierda)
35817KR (derecha)

(3,2 mm - 1/8" no perfo, rígida)

La férula para desviación cubital más realista y funcional para manos con artritis reumatoide en fase inicial.

A close-up photograph of a woman's face, smiling and looking slightly to the side. She is wearing a blue, flexible, looped device on her right hand and wrist. The device has a small red mark on the back of her hand. The background is a blurred outdoor scene with green foliage.

RÁPIDAS Y
FÁCILES
DE HACER

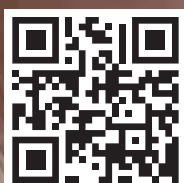

TIRAS ORFIT®

CARACTERÍSTICAS

Tiras precortadas de Orfit® Colores NS.

Material recubierto antiadherente.

Bordes suaves cortados a máquina.

Disponibles en dos anchos y dos grosores.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Sin desperdicio de material.
Férulas ligeras y atractivas.
Selección de colores de acuerdo con las preferencias del paciente.

No permite uniones accidentales.
El calor seco proporciona una unión permanente.
Se puede adherir en donde se desee.

Acabado rápido de las ortesis.

Selección de grosor del material de acuerdo con la resistencia a la fuerza requerida.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Diseños ortésicos correctivos pequeños, rápidos y sencillos para dedos y manos. Múltiples posibilidades de aplicación, por ejemplo, ortesis contra el "cuello de cisne", la "mano en garra", etc.

Envuelva alrededor de objetos de ayuda funcional para aumentar su tamaño.


Se puede adherir a otras ortesis para aumentar la rigidez.



TIRAS ORFIT®			material laminado	
Grosor (mm-pulgadas)	Piezas/color	Diseño	45 cm x 0.5 cm	45 cm x 2 cm
2.0 mm - 1/12"	10 x plateado sónico	estrechas	8113MG.1/NS	
	10 x dorado	estrechas	8113GO.1/NS	
	5 x plateado sónico - 5 x dorado	estrechas	8113GOMG.1/NS	
3.4 mm - 1/8"	10 x dorado	anchas		8124GO.1/NS
	10 x azul atómico	anchas		8124MB.1/NS
	5 x dorado - 5 x azul atómico	anchas		8124MBGO.1/NS

A photograph of an elderly man with white hair and a beard, wearing a plaid shirt and jeans. He is smiling and holding a yellow bottle. His right arm is in a white Orfit brace. The background is a blurred outdoor scene.

¡LA SOLUCIÓN
PERFECTA PARA
PRESUPUESTOS
AJUSTADOS!

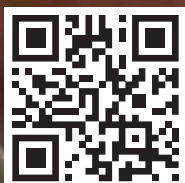

ORFIT® ECO

CARACTERÍSTICAS

Orfit Eco es un material no revestido. Ofrece una rigidez excelente y tiene una resistencia excelente a las huellas dactilares.

Resistencia elevada al estiramiento y capacidad de moldeado baja.

Memoria elástica baja a moderada.

Material ecológico.

Atractivo acabado de superficie lisa.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Se puede usar una unión temporal durante el proceso de moldeado para mantener el material en su lugar. No hay riesgo de uniones accidentales. Unión permanente solo cuando así se desea, por medio de calor seco.

Permite aplicar presión durante la fabricación de la ortesis. Fácil manejo y control del material durante el moldeado.

Material muy fuerte que mantiene perfectamente su forma ante un aumento en el tono. La combinación de la capacidad de moldeado y de un diseño de molde preciso permite moldear de forma que se adapte a la anatomía del paciente.

Las ortesis son completamente remodelables. Evita el desperdicio de material.

Material reciclado de alta calidad.


APLICACIONES RECOMENDADAS

Excelente rigidez para ortesis grandes que requieren soporte completo:
Ortesis para rodilla y pie
Corsés ortopédicos
Soportes para espalda

Específicamente recomendado para fabricar ortesis antiespásticas.

Ideal para moldear directamente sobre las vendas y los forros de algodón en condiciones posquirúrgicas.

ORFIT® ECO		material laminado	
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	45 cm x 60 cm • 17 11/16" x 23 5/8"	60 cm x 90 cm • 23 5/8" x 35 3/8"
2.4 mm - 3/32"	no perfo	8938N.1	
	mini perfo	8938N.4	
3.2 mm - 1/8"	no perfo	8934N.1	8954N.1
	mini perfo	8934N.4	8954N.4

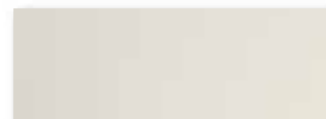


NO PERFO



MINI PERFO

A woman with long blonde hair, wearing a white sleeveless top and blue jeans, is sitting outdoors. She is smiling and looking down at a tablet computer she is holding in her hands. She is wearing a black Orfit brace on her right forearm, which has blue accents. The background is a blurred green landscape.

¡ALTO
RENDIMIENTO,
GRAN VALOR!

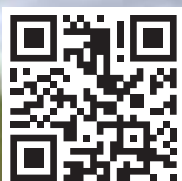

ORFIT® ECO NEGRA NS

CARACTERÍSTICAS

Orfit Eco Negra NS es un material con revestimiento antiadherente.

Ofrece una rigidez excelente y tiene una resistencia excelente a las huellas dactilares.

Resistencia elevada al estiramiento y capacidad de moldeado baja.

Memoria elástica baja a moderada.

Material ecológico.

Atractivo acabado de superficie lisa.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Se puede usar una unión temporal durante el proceso de moldeado para mantener el material en su lugar. No hay riesgo de uniones accidentales. Unión permanente solo cuando así se desee por medio de calor seco y después de retirar el recubrimiento.

Permite aplicar presión durante la fabricación de la ortesis. Fácil manejo y control del material durante el moldeado.

Material muy fuerte que mantiene perfectamente su forma ante un aumento en el tono. La combinación de la capacidad de moldeado y de un diseño de molde preciso permite moldear de forma que se adapte a la anatomía del paciente.

Las ortesis son completamente remodelables.

Evita el desperdicio de material.

Material reciclado de alta calidad.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Excelente rigidez para ortesis grandes que requieren soporte completo:
Ortesis para rodilla y pie
Corsés ortopédicos
Soportes para espalda

Específicamente recomendado para fabricar ortesis antiespásticas.

El revestimiento antiadherente permite un moldeado directo sobre las vendas y los forros de algodón en condiciones posquirúrgicas.

ORFIT® ECO NEGRA NS		material laminado	
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	45 cm x 60 cm • 17 11/16" x 23 5/8"	60 cm x 90 cm • 23 5/8" x 35 3/8"
2.4 mm - 3/32"	no perfo	8938Z.1/NS	
	mini perfo	8938Z.4/NS	
3.2 mm - 1/8"	no perfo	8934Z.1/NS	8954Z.1/NS
	mini perfo	8934Z.4/NS	8954Z.4/NS




NO PERFO



MINI PERFO

A woman with long blonde hair, smiling, wearing a dark blue sweater over a white top. She is holding a glass of champagne. Her right arm is in a white Orfit brace, which is a rigid, white, sleeve-like device with several white straps and buckles. The background is a blurred indoor setting.

SOPORTE
FUERTE
Y RÍGIDO.

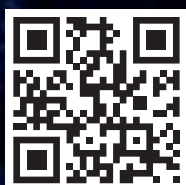

TECNOFIT® es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

CARACTERÍSTICAS

Transparente al activarse.

Excelente elasticidad (1000%) sin rasgarse.

Material no revestido.

Excelente memoria elástica (100%).

Bordes fáciles de recortar.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

La transparencia indica el momento en que el material está listo para moldearse. Permite una alineación adecuada y un monitoreo visual sobre los puntos de referencia anatómicos.

Su moldeado muy preciso se adapta a la anatomía del paciente, por ejemplo, en los arcos de la mano y el primer espacio interdigital. El moldeado exacto mejora la correcta distribución de presión sobre la piel.

Adherencia temporal durante la fabricación de la férula y unión permanente por medio del uso de calor seco. La adhesividad ayuda a que la ortesis se quede en su lugar durante la fabricación. Todos los accesorios y soportes se pueden adherir fácilmente. Superficie blanca brillante estéticamente agradable.

Completamente remoldeable y se puede ajustar con facilidad al recalentarse en forma local. Evita el desperdicio de material.

Extrema comodidad para el paciente.

APLICACIONES RECOMENDADAS


Potencial ilimitado para la fabricación de todos los tamaños de férulas con cuidado y prevención adicionales de puntos de presión.

Ortesis para pulgar, ortesis para mano, muñeca, muñeca/pulgar, ortesis para codo, collares cervicales, corsés ortopédicos.

Ortesis grandes, ortesis largas para brazos, ortesis para tobillo-pie, y refuerzo de fracturas.

Excelente como base para diferentes accesorios.

TECNOFIT®		material laminado	
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	45 cm x 60 cm • 17 11/16" x 23 5/8"	60 cm x 90 cm • 23 5/8" x 35 3/8"
2.5 mm - 3/32"	no perfo	8738.1	
	maxi perfo	8738.3	
	mini perfo	8738.4	
3.2 mm - 1/8"	no perfo	8734.1	8754.1
	mini perfo	8734.4	8754.4

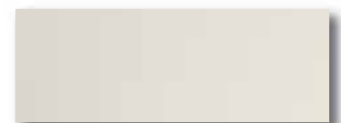

NO PERFO




MINI PERFO



MAXI PERFO

A woman with long blonde hair is sitting in a sun-dappled forest. She is wearing a black short-sleeved shirt and is adjusting a white and black prosthetic arm on her right arm. The background is a lush green forest with sunlight filtering through the trees.

DE VUELTA A
LA ACCIÓN, LO
ANTES POSIBLE...

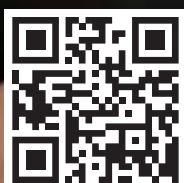

ORFIBRACE™ es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

ORFIBRACE™

CARACTERÍSTICAS

Resistencia elevada al estiramiento y capacidad de moldeado baja.

Rigidez elevada.

Memoria moderada.

Material revestido antiadherente.

Resistencia excelente a las huellas dactilares.

Acabado de superficie lisa.
Bordes fáciles de recortar y alisar.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Fácil manejo y control del material durante el moldeado.

Material muy fuerte que mantiene perfectamente su forma ante un aumento en el tono. Excelente para todos los tipos de accesorios mecánicos.

Remoldeable. Las férulas se pueden ajustar fácilmente después de recalentar en forma local.

El recubrimiento elimina la unión accidental. El material no se adhiere a las vendas durante el moldeado.

Permite aplicar presión durante la fabricación de la ortesis.

Sensación de superficie cómoda y agradable, lo cual estimula el cumplimiento por parte del paciente.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Ideal para ortesis grandes y rígidas.

Adecuada para corsés para el tronco, soportes de tobillo y ortesis de codo, antebrazo y muñeca.

Material ideal para soportes permanentes.

Material excelente para fabricar ortesis antiespásticas. Ideal para moldear sobre moldes positivos de yeso protegidos por un forro de algodón.



Disponible en formas precortadas


Ortesis de tobillo-pie, independencia flexible y fiable para su paciente. Sin riesgo de heridas de presión en el talón.

ORFIBRACE™		material laminado	
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	45 cm x 60 cm • 17 1/16" x 23 5/8"	60 cm x 90 cm • 23 5/8" x 35 3/8"
3.0 mm - 1/8"	no perfo		8854.1
	macro perfo		8854.6
ORFIBRACE™		precortada	
Tamaño	Edades/talles de zapatos (Eur)	N.º de art.	
Doble extra pequeña	0-10 años de edad	35980/OB	
Extra pequeña	10-15 años de edad	35981/OB	
Pequeña	37-39 de talla	35982/OB	
Mediana	40-42 de talla	35983/OB	
Grande	43-45 de talla	35984/OB	



A woman with long, wavy brown hair and blue eyes, wearing a blue t-shirt, is leaning on a wooden railing. She is looking off to the side with a slight smile. On her left forearm, she is wearing a white, custom-molded Orfit brace. The background is a soft-focus green landscape.

¡FÁCIL DE HACER,
SE ADAPTA
PERFECTAMENTE!

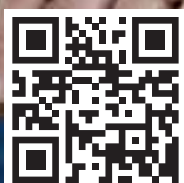

ORFIT® FLEX

CARACTERÍSTICAS

Elevada capacidad para amoldarse y alta rigidez.

Material no revestido.

Baja resistencia al estiramiento.

Tiempo de trabajo prolongado.

Memoria elástica mínima.

Sensación suave y aterciopelada al tacto.

Menos sensible a los rayos UV

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Se adapta fácilmente a los contornos anatómicos. La adaptación de alta precisión a los contornos previene los puntos de presión. Utilice posiciones asistidas por la gravedad para fabricar las ortesis más grandes. Ortesis adaptables y cómodas.

Es posible la unión temporal durante el moldeo. La unión permanente se logra con calor seco.

Se requiere una manipulación mínima.

Permite tomar medidas de cuidado adicionales respecto del posicionamiento correcto.

De fácil manejo.

Mayor comodidad y aceptación en el paciente.

Acabado de superficie duradero y estéticamente agradable.


APLICACIONES RECOMENDADAS

Excelente para fabricar férulas dorsales acanaladas sin ejercer presión sobre las articulaciones. Todas las ortesis en las cuales sean necesarios un soporte excelente y un ajuste íntimo.

Adecuada para fabricar ortesis correctivas que requieren un moldeo de alta precisión.

Especialmente recomendada para el tratamiento de condiciones reumáticas.

ORFIT® FLEX			
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	45 cm x 60 cm • 17 11/16" x 23 5/8"	60 cm x 90 cm • 23 5/8" x 35 3/8"
2.4 mm - 3/32"	no perfo	1338.1	
	macro perfo	1338.6	
3.2 mm - 1/8"	no perfo	1334.1	1354.1
	macro perfo	1334.6	1354.6

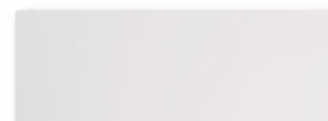


NO PERFO



MACRO PERFO

A woman with short, curly brown hair is smiling and looking to her right. She is wearing a green long-sleeved shirt and a black strap over her shoulder. She is holding a clear plastic water bottle in her left hand and a white Orfit brace on her right forearm with her right hand. The brace has four red straps. The background is a blurred outdoor setting with stone steps.

UN "NUEVO
CLÁSICO"
MEJORADO POR
ORFIT INDUSTRIES

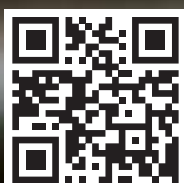

ORFIT® EASE

CARACTERÍSTICAS

Elevada capacidad de moldeado y alta rigidez.

Resistencia moderada al estiramiento y comportamiento no elástico.

Material adherente no revestido.

Memoria elástica mínima.

Suave sensación al tacto y bordes fáciles de recortar.

Menos sensible a los rayos UV.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Se adapta fácilmente a los contornos anatómicos. La adaptación de alta precisión a los contornos previene los puntos de presión. Utilice posiciones asistidas por la gravedad para fabricar las ortesis más grandes. Ortesis adaptables y cómodas.

Se requiere una manipulación mínima. Fácil de controlar durante la fabricación.

Es posible la unión temporal durante el moldeado. La unión permanente se logra con calor seco.

Se pueden realizar pequeñas correcciones después de recalentar en forma local.

Mayor comodidad y aceptación en el paciente.

Acabado de superficie duradero y estéticamente agradable.

APLICACIONES RECOMENDADAS


Todas las ortesis en las cuales sean necesarios un soporte excelente y un ajuste íntimo.

Excelente para fabricar férulas dorsales acanaladas sin ejercer presión sobre las articulaciones.

Base para ortesis de inmovilización.

Especialmente recomendada para el tratamiento de condiciones reumáticas.

ORFIT® EASE		material laminado	
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	45 cm x 60 cm • 17 11/16" x 23 5/8"	60 cm x 90 cm • 23 5/8" x 35 3/8"
3.2 mm - 1/8"	no perfo	1234.1	1254.1
	macro perfo	1234.6	1254.6

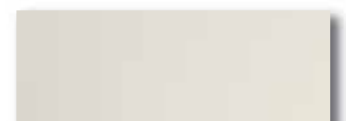

NO PERFO



MACRO PERFO

The background of the advertisement is a photograph of a hand pouring small, white, spherical pellets from a white container into another hand held below. The background is a clear blue sky. An orange rectangular box is positioned on the right side of the image, containing the text "SIEMPRE SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DE SUS PACIENTES".

SIEMPRE SE AJUSTA
A LAS NECESIDADES
DE SUS PACIENTES



ALLFIT

CARACTERÍSTICAS

Gránulos pequeños de material termoplástico.

Bolsas de tamaño conveniente para múltiples aplicaciones.

Tiempo de activación rápido (1 minuto).

Transparente al activarlo, blanco al enfriarse.

Los gránulos simplemente se unen uniformemente y se adhieren bien a otros objetos de superficie.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

No es necesario cortar retazos pequeños de láminas grandes.

De fácil preservación y almacenamiento.

Rápido y fácil de usar sin necesidad de entrenamiento especial.

Indican el momento en que el material está listo para moldearse. Color neutral agradable.

Tiempo de fusión rápido y adherencia rápida alrededor de objetos. Fácil de moldear en la forma deseada. Toda la superficie es lisa para aumentar la comodidad del paciente.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Cambie la forma de cualquier accesorio o manija de utensilio.

Agregue componentes adicionales a las ortesis.

Utilice como separador del primer espacio interdental.

Son posibles aplicaciones infinitas.

Mejore el agarre del paciente agrandando, mejorando o dándole nueva forma a los objetos que necesita sostener y utilizar durante las actividades de la vida diaria, como por ejemplo cuchillos, tenedores y cucharas.

1

Simplemente vierta los gránulos en agua caliente (65° C – 149 °F). Cuando se hayan transformado en una masa transparente, Allfit estará listo para usarse.




2

En ese momento, la masa se puede moldear en cualquier forma imaginable.



ALLFIT

N.º de art.	Descripción
703011	Caja con 6 bolsas de 500 g

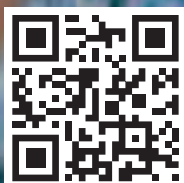

ORFIZIP® es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

ORFIZIP® NS Y ORFIZIP® NEGRA NS

CARACTERÍSTICAS

Ortesis precortadas con cremallera doble.

Excelente elasticidad (1000%) sin rasgarse.

Material revestido antiadherente.

Memoria elástica elevada.

Disponible en 3 tamaños (S [pequeño] - M [mediano] - L [grande]) y diversas opciones de grosor y estilos de perforación.

Fabricación rápida y sencilla.

Se recorta fácilmente.

Muy ligera.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Cada férula precortada se puede usar para fabricar una ortesis de mano izquierda o derecha.

Su moldeado muy preciso se adapta a la anatomía del paciente, por ejemplo, en los arcos de la mano y el primer espacio interdigital. El moldeado exacto mejora la correcta distribución de presión sobre la piel.

No permite uniones accidentales. El revestimiento permite una unión temporal durante la fabricación. Es posible una unión permanente y confiable después de retirar el revestimiento y usar calor seco. Todos los accesorios y soportes se pueden aplicar con una máxima facilidad. Evita que el material se adhiera a las vendas o al forro de algodón. Fácilmente remodelable. Cierre por el lado cubital.

Se puede adaptar a todos los tamaños de muñeca. Óptima ventilación de la piel.

Ahorra tiempo.

Se puede ajustar la longitud. Mayor comodidad y aceptación en el paciente.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Orfizip es adecuada para todas las lesiones traumáticas de muñeca que requieren una inmovilización circunferencial.

Funciona como una excelente base para accesorios y soportes ya que no migra en forma distal.



ORFIZIP® NS		férula para muñeca		
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	pequeña	mediana	grande
2.0 mm - 1/12"	maxi perfo	39108/NS	39109/NS	39110/NS
3.2 mm - 1/8"	mini perfo	39111/NS	39112/NS	39113/NS
ORFIZIP® NEGRA NS		férula para muñeca		
Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	pequeña	mediana	grande
2.0 mm - 1/12"	maxi perfo	39108Z/NS	39109Z/NS	39110Z/NS
3.2 mm - 1/8"	mini perfo	39111Z/NS	39112Z/NS	39113Z/NS




MINI PERFO



MAXI PERFO



COMODIDAD
EFICIENTE
CON ORFIZIP®

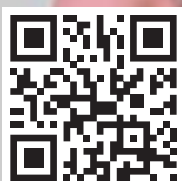

CORSÉ ORTOPÉDICO DE TORSO COMPLETO

1/2 corsé ortopédico de torso completo ompleto precortado

Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	Doble extra pequeño	extra pequeña	pequeña	mediana	grande	extra grande
3.0 mm - 1/8"	mini perfo	39948	39949	39950	39951	39952	39953

ORFIZIP® es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

CARACTERÍSTICAS

Material de ferulización precortado con forro completo de algodón y cremallera doble.

Excelente elasticidad sin rasgarse.

Memoria elástica elevada.

Disponible en 3 tamaños (S [pequeño] - M [mediano] - L [grande]) y diversas opciones de grosor y estilos de perforación.

Fabricación rápida y sencilla.

Se recorta fácilmente.

Muy ligera. Sensación suave y agradable.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Cada férula precortada se puede usar para fabricar una ortesis de lado izquierdo o derecho. Cierre por el lado cubital. Fácil de poner y sacar. Estéticamente agradable y lavable.

El ajuste sencillo y el moldeado muy preciso se adaptan a la anatomía del paciente. El moldeado exacto mejora la correcta distribución de presión sobre la piel.

Se pueden realizar fácilmente pequeñas correcciones y ajustes cuando sea necesario calentando puntos específicos con una pistola de calor.

Se puede adaptar a todos los tamaños de muñeca.

Ahorra tiempo.

Se puede ajustar la longitud.

Mayor comodidad y aceptación en el paciente.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Orfizip es un sistema de inmovilización completo que sirve para una amplia gama de aplicaciones de ferulización:

Orfizip para muñeca:

- Inmovilización posquirúrgica
- Síndrome del túnel carpiano
- Esguinces de muñeca - inestabilidad de las articulaciones

Orfizip para muñeca y pulgar:

- Fracturas del escafoides o de Bennett
- Tenosinovitis de De Quervain
- Inestabilidad o inflamación de las articulaciones de la muñeca y del pulgar (artritis)
- Manejo del pulgar posoperatorio

Férula para rodilla:

- Inmovilización posquirúrgica
- Corrección de contracturas en flexión
- Asistencia para ponerse de pie (hemiplejía, paraplejía)

Corsé:

- Osteoporosis - Espondilosis - Molestias en la espalda - Paraplejía - Artritis

FÉRULA PARA MUÑECA

Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	Doble extra pequeño	extra pequeña	pequeña	mediana	grande	extra grande
2.0 mm - 1/12"	maxi perfo		39099	39100	39101	39102	
3.0 mm - 1/8"	mini perfo			39105	39106	39107	

FÉRULA PARA MUÑECA/PULGAR

Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	Doble extra pequeño	extra pequeña	pequeña	mediana	grande	extra grande
2.0 mm - 1/12"	maxi perfo		39199	39200	39201	39202	
3.0 mm - 1/8"	mini perfo			39205	39206	39207	

FÉRULA PARA RODILLA

Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	Doble extra pequeño	extra pequeña	pequeña	mediana	grande	extra grande
2.0 mm - 1/12"	mini perfo		39300	39301	39311	39312	39313
3.0 mm - 1/8"	mini perfo		39305	39306	39316	39317	39318

CORSÉ


1/2 corsé precortado regular

Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	Doble extra pequeño	extra pequeña	pequeña	mediana	grande	extra grande
3.0 mm - 1/8"	mini perfo	39399	39400		39402	39404	39406

CORSÉ

1/2 corsé precortado a la cintura

Grosor (mm-pulgadas)	Tipos de perforación	Doble extra pequeño	extra pequeña	pequeña	mediana	grande	extra grande
3.0 mm - 1/8"	mini perfo			39401	39403	39405	

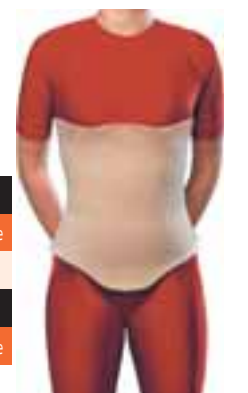

CARACTERÍSTICAS

- Accesorios y soportes ligeros.
- Aspecto estéticamente agradable para el paciente.
- Diseño de bajo perfil.
- Amplia selección entre Orfitubes y espirales de resortes para articulaciones.
- Fabricación rápida y sencilla de accesorios de soporte.
- Se puede adherir en forma segura a cualquier ortesis.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

- Mayor comodidad para el paciente.
- Mayor cumplimiento del protocolo por parte del paciente.
- Los espirales de los resortes permiten el acceso a las zonas laterales de las articulaciones.
- Los sistemas de barras transversales permiten crear fuerza de tracción perpendicular en el segmento afectado.
- Los ajustadores Orfitube permiten una alineación sencilla y correcta de las bandas para los dedos. Ángulos fáciles de ajustar. Ajuste simplificado y reajuste de los ángulos correctos de alineación y de las fuerzas aplicadas.
- Reducción del tiempo de fabricación.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Ortesis de movilización:
Sistemas dinámicos y evolutivos, por ejemplo: férulas posoperatorias después de cirugía del tendón o para recuperar el rango de movimiento.
- Permite respetar el protocolo de rehabilitación recetado y el cronograma de uso.
- Mejora la calidad del cuidado del paciente y la velocidad de recuperación.
- Garantiza los aspectos funcionales de las ortesis.
- Se recomienda especialmente para la fabricación de ortesis posturales.



DYNASYST™ - ORFITUBE™

Las férulas dinámicas posoperatorias deben poder ajustarse con facilidad y precisión para proporcionar una férula personalizada de la mejor calidad. Gracias al sistema único de ORFITUBE™, se usa una longitud máxima de hilo elástico y, además, el elástico está protegido.

Las ORFITUBES™ se conforman en frío, son resistentes al impacto y se pueden cortar al largo deseado.

Las férulas dinámicas funcionales no deben entorpecer las actividades diarias, deben ser poco visibles y deben tener un aspecto estético.

DYNASYST™ es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries



DYNASYST™

HILO ELÁSTICO

Carrete de 10 m - 394"
Elasticidad: al menos 200%.
No envejece después de 6 semanas de estiramiento máximo.
35312: Resistencia máx. ± 200 g. Para soporte de los músculos débiles de los dedos.
35313: Resistencia máx. ± 400 g. Para la mayoría de las férulas dinámicas para dedos.
35314: Resistencia máx. ± 600 g. Para férulas dinámicas para extensión de la muñeca o para contracturas de los dedos muy persistentes.



EXTREMOS PARA ORFITUBE™

35318
20 pzs.
Extremos para tubos platinados con cromo, se ajustan a todos los ORFITUBES™ y reducen el frotamiento del hilo elástico con el borde del tubo al mínimo.



KIT ORFITUBE™

35311
Contiene:
• 10 tubos de 330 mm - 13" de longitud.
• 3 tipos diferentes de hilo elástico con distintos grados de fuerza elástica (en un carrete).
• 1 carrete de monofilamento de poliéster para un efecto deslizante óptimo (si es necesario).
• 2 guías flexibles.



KIT DE AJUSTADOR ÚNICO ORFITUBE™

35305
El ajustador único Orfitube™ le otorga el control total de la posición longitudinal y lateral de los Orfitubes™. Pero puede mirar este producto desde más de un ángulo. Su diseño compacto le permite fijar un ajustador individual para cada dedo. Los ajustadores son ligeros, muy eficaces en función del costo y más elegantes que nunca.



ORFITUBES™+GUÍAS FLEXIBLES

35310
10 tubos de 330 mm - 13" de longitud. incl. 2 guías flexibles.



AJUSTADOR ÚNICO ORFITUBE™ - 5 PZS. + LLAVE ALLEN

35304
5 ajustadores únicos Orfitube + 1 llave Allen



HILO DE MONOFILAMENTO DE POLIÉSTER

35315
Carrete de 75 m - 2953" Usado para aumentar el deslizamiento del hilo elástico en el ORFITUBE™, por ejemplo, cuando el ORFITUBE™ está torcido a nivel local y cuando no se puede determinar la longitud del elástico.



HERRAMIENTA DE DOBLADO DE ORFITUBE™

35308
Para un doblado sencillo de los fuertes ORFITUBES™ sin esfuerzo de los pulgares.



DYNASYST™

RESORTES EN ESPIRAL PARA ARTICULACIONES

35800


10 pzs. (Calibre 0,7 mm - 1/37" - diámetro del espiral 5 mm - 1/5") Resorte de acero inoxidable. La pata corta se dobla y se encaja en el puente dorsal de la férula. La pata larga se dobla y se corta al largo deseado. La fuerza del resorte se ajusta modificando el diseño del espiral.



RESORTE EN ESPIRAL PARA EXTENSIÓN DE LA MUÑECA

35804

10 pzs. (5 izq.+5 der.) (Calibre 1,5 mm - 1/16" - diámetro del espiral 15 mm - 3/5") Resorte de acero inoxidable. Se proporcionan dos tipos: con espiral izquierdo o derecho. Fuerza de torsión al ajustarlo en un ángulo superior a 130°: 5000 g/cm.

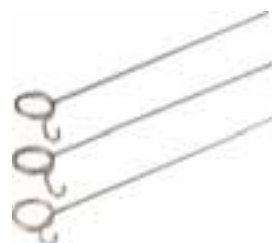

RESORTE EN ESPIRAL FLEXOR DE NUDILLOS

35801

10 pzs. (Calibre 1 mm - 1/24" - diámetro del espiral 10 mm - 5/12") Resorte de acero inoxidable. Diseñado para asistir con la debilidad intrínseca de los músculos, p. ej., con parálisis del nervio cubital. También se puede dar vuelta el resorte para aumentar su potencia. Fuerzo de torsión a una extensión completa del dedo: ca. 1000 g/cm.



FÉRULA PARA EXTENSIÓN RADIAL DE LA MUÑECA

35865K (pequeña)

35866K (mediana)

35867K (grande)

Los pacientes en tratamiento del nervio radial necesitan la asistencia de dos espirales de extensión fuertes. Durante la recuperación, los espirales ayudan a reequilibrar la potencia muscular.

Kit:

- 2 férulas precortadas ORFIT® (3,2 mm - 1/8" no perforadas rígidas).
- 2 resortes en espiral laterales: Diámetro del espiral 1,5 mm - 1/16". Diámetro del espiral 15 mm - 3/5" - fuerza de torsión: 5000 g/cm.



AYUDA PARA EXTENSIÓN DEL DEDO

35802

10 pzs. (Calibre 1 mm - 1/24" - diámetro del espiral 4 mm - 1/6") Resorte de acero inoxidable. La segunda pata se encaja entre las dos capas de ORFIT® Classic. La pata larga se dobla al tamaño deseado. A una flexión total del dedo, el resorte se ajusta hasta una fuerza de torsión de ca. 2000 g/cm. El resorte está especialmente diseñado para ayudas de extensión de los dedos junto con la férula ORFIT® (n.º ref. 35818 a 35822).



RESORTE DE ACERO INOXIDABLE

35805

Longitud: 15 m - 591". Grosor: 1 mm - 1/24" Para fabricar sus propios resortes en espiral y soportes.



CINTA DE GANCHO Y BUCLE

CINTA DE GANCHO+BUCLE - 25 MM

Longitud: 25 m - 98 2/5"



Color	Anchura	CINTA DE BUCLE Estándar	CINTA DE BUCLE Autoadherente	CINTA DE GANCHO Estándar	CINTA DE GANCHO Autoadherente
blanca	25 mm - 1"	35400L	35405L	35400H	35405H
beige	25 mm - 1"	35411L	35412L	35411H	35412H
azul	25 mm - 1"	35401L			35406H
negra	25 mm - 1"	35404L			35409H
amarillo fluorescente	25 mm - 1"	35402L			35407H
rosado fluorescente	25 mm - 1"	35403L			35408H

CINTA DE GANCHO+BUCLE DE DOBLE LADO - 25 MM

Longitud: 25 m - 98 2/5"



Descripción	N.º de art.	Color	Anchura
Cinta de bucle de terciopelo de doble lado	35444L	negra	25 mm
Microcinta de gancho de doble lado	35444H	negra	25 mm

CINTA DE GANCHO+BUCLE - 50 MM

Longitud: 25 m - 98 2/5"



Color	Anchura	CINTA DE BUCLE Standard	CINTA DE BUCLE Autoadherente	CINTA DE GANCHO Estándar	CINTA DE GANCHO Autoadherente
blanca	50 mm - 2"	35413L	35414L	35413H	35414H
beige	50 mm - 2"	35415L	35416L	35415H	35416H
negra	50 mm - 2"	35441L			35442H

CINTA DE GANCHO Y BUCLE

CINTA DE BUCLE ELÁSTICA

Longitud: 25 m - 98 2/5"

	Color	Anchura	CINTA DE BUCLE ELÁSTICA
	blanca	25 mm - 1"	35437L
	beige	25 mm - 1"	35439L
	blanca	50 mm - 2"	35438L
	beige	50 mm - 2"	35440L
	negro	50 mm - 2"	35443L

CORREA PARA FÉRULA

	Longitud	Anchura	CORREA PARA FÉRULA
	250 mm - 10"	25 mm - 1"	35450
	400 mm - 15 3/4"	25 mm - 1"	35455
	500 mm - 20"	25 mm - 1"	35460



Cinta de gancho+bucle de doble lado: página 47

ALMOHADILLADO Y FORRO

LUXOFOAM NO PERFORADA

35110

LUXOFOAM es una espuma de PVC blanda usada para el almohadillado de superficies pequeñas. No se separa cuando se calienta en agua, por lo que se puede usar para aplicaciones de férulas prealmohadilladas.

Tamaños:

49 cm x 97 cm x 3 mm.

19 3/10" x 38 1/5" cm x 7/64"



LUXOFOAM PERFORADA

35112

Tamaños:

49 cm x 97 cm x 3 mm.

19 3/10" x 38 1/5" cm x 7/64"



ORFILASTIC

35111

ORFILASTIC es un material de forro de felpa con un dorso de espuma de célula abierta autoadhesiva. Se usa para cubrir grandes superficies de férulas para evitar y absorber la transpiración. Se puede retirar fácilmente con agua tibia.

Tamaños:

50 cm x 1 m x 3 mm.

20" x 39 2/5" x 7/64"



ORFILASTIC NEGRA

35117

ORFILASTIC NEGRA está hecha de un material de forro de felpa con un dorso de espuma de célula abierta autoadhesiva. Se usa para cubrir grandes superficies de férulas para prevenir y absorber la transpiración. Se puede retirar fácilmente con agua tibia.

Tamaños :

50 cm x 1 m x 3 mm.

20" x 39 2/5" x 7/64"



TIRAS PARA BORDES - TIRAS DE TERCIOPELO PARA BORDES

360201N.ST1
color natural

35116
negra

Tamaños :

1 mm x 20 mm x 3000 mm

1/25" x 3/4" x 118 1/10"

(color natural)



ACCESORIOS

TIJERAS GINGER

35066

Votadas como las mejores tijeras en el mundo por la mayoría de los terapeutas.



TIJERAS PARA VENDAS

35067

Ideales para retirar y recortar el material de férulas termoplásticas. Cuchillas de acero inoxidable con punta roma para proporcionar seguridad durante la remoción.



TIJERAS AFILADAS

35069

Diseño angosto excelente para recortar soportes. Las cuchillas de acero inoxidable se curvan en ángulo hacia la derecha para facilitar el recorte en curvas.



TIJERAS DENTADAS

35064

Tijeras dentadas con resorte de retorno para cortar láminas de hasta 3,2 mm - 1/8".



MARCADOR AMARILO

35003G

Este marcador especial permite dibujar un molde en el material de ferulización que es indeleble incluso en agua pero que se borra fácilmente con un trapo.



TIJERAS FUERTES

35065

Tijeras dentadas fuertes con resorte de retorno para cortar láminas desde 2 mm - 1/12" hasta 4,2 mm - 3/16".



PINZAS CON ESPIRAL DE RESORTE

35140

Pinzas con punta completamente redonda para convertir el cable del resorte en un espiral con un diámetro desde 5 mm - 1/5" hasta 10 mm - 2/5".



PERFORADOR DE OJALES (PLATEADO EN CROMO)

35134

Para perforar ojales en cuero, correas de fijación y ORFIT® 1,6 mm - 1/16" y 2 mm - 1/12".

35137

200 piezas de ojales de 4 mm 1/6" de diámetro



CUCHILLO PARA DESBARBAR

35307

Para suavizar los bordes de las férulas. Ideal para el acabado rápido y eficiente de férulas fabricadas con material no perforado. Hay dos cuchillas dentro del mango.

35307B10

10 cuchillas de repuesto con corte recto

35307B20

10 cuchillas de repuesto de corte oblicuo



DINAMÓMETRO

35105

Dinamómetro preciso, máx. 600 g. Ideal para medir tracciones estáticas y dinámicas de la férula. Un anillo se encuentra adherido a un extremo y un clip, al otro extremo.



REGLA ORFICAST

35319

Nueva herramienta que facilita el uso de la cinta termoplástica Orficast.

El uso de la regla Orficast le permite:

- seleccionar y cortar en forma precisa la longitud correcta de cinta Orficast para una férula o yeso específicos;
- evitar cualquier desperdicio de producto;
- medir y precortar fácilmente varios trozos (con una longitud estándar) antes de un ferulaje en serie;
- evitar la necesidad de tener en cuenta el factor natural de encogimiento de la cinta termoplástica;
- evitar la necesidad de estirar la cinta activada en forma previa a su aplicación en el paciente.



SUSPAN 1

35097/115/1400 (115V)

35097/230/1400 (220V)

Baño de agua grande de acero inoxidable. Incluye termostato eléctrico, temporizador y medidor de temperatura digitales, tapa y drenaje de agua.

Dimensiones internas:

740 x 540 x 100 mm

29 1/25 x 21 1/4 x 4"

Contenido de agua: aproximadamente 30 l.



SUSPAN 2

32500/0 (220V)

Baño de agua pequeño de acero inoxidable.

Incluye termostato eléctrico y tapa.

Rango de temperaturas: entre 65 °C (149 °F) y 95 °C (203 °F).

Dimensiones internas:

295 x 500 x 100 mm

11 3/5 x 20" x 4"

Contenido de agua: aproximadamente 10 l.



PISTOLA DE CALOR HG-2000E 220 V

35352

Pistola de calor eléctrica con un panel de control digital que proporciona configuraciones de calor que oscilan entre 50 °C (122 °F) y 650 °C (1202 °F) y permite, además, ajustar el flujo de aire (250-500 l/min). Característica de apagado automático para mayor seguridad. Incluye los siguientes 3 accesorios: punta concentradora, boquilla ancha y protector de vidrio.

Se pueden usar para dirigir el flujo de aire a un área más específica de la férula, lo que hace que su manejo sea incluso más eficiente y sencillo. Ideal para calentar áreas precisas en férulas termoplásticas pequeñas y grandes para adherir, de esta forma, accesorios y correas o para realizar correcciones más detalladas en el futuro.

Se sostiene por sí misma, lo que les permite a los médicos usar ambas manos para manipular los materiales de ferulaje cuando así lo necesitan. 230V-2000 vatios - cable de energía de 3m certificado por CE, y también certificado y tipificado por EMC, ENEC, GS, LVD y VDE.



CALENTADOR SECO

CARACTERÍSTICAS

- Dispositivo compacto.
- Móvil y de pequeñas dimensiones.
- Compatible con diferentes redes eléctricas.
- Uso seguro.
- Calentamiento rápido.
- Sin necesidad de agua.
- Puesta en marcha muy rápida y corto tiempo de preparación.
- Se puede utilizar para diversas láminas y precortes de materiales termoplásticos.
- El material de férula termoplástica se enfría más lentamente cuando se calienta con el calentador seco, lo que permite tener más tiempo para moldear.
- Higiénico ya que la lámina de Teflón puede desinfectarse con un spray o jabón anti-bacteriano.
- Si se desea o es necesario, se puede usar polvo de talco para reducir la pegajosidad del material de férula caliente.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

- El aparato es portátil y ahorra espacio porque no necesita una gran mesa ni una sala grande para funcionar.
- Sólo se necesita conectarlo a la red eléctrica.
- Hay diferentes enchufes disponibles que pueden usarse en varios países.
- Bajo consumo de energía.
- Fácil de transportar y llevar consigo hacia el domicilio del paciente si este es incapaz de moverse o de ir al centro del terapeuta o al hospital.
- Aplicación fácil y eficiente en el campo de la rehabilitación para crear férulas individuales de fijación intermaxilar
- Listo para usar al instante, no es necesario esperar durante mucho tiempo hasta que el dispositivo esté a la temperatura adecuada.
- Corta espera hasta que el material termoplástico está caliente.
- Mayor tiempo para moldear comparado con el procedimiento de calentar el material de la férula con agua caliente.
- Desconexión automática al cabo de 10 minutos.
- La posición plana del material termoplástico (no flotando libremente en el agua) disminuye el riesgo de pegarse accidentalmente mientras se calienta.
- Se recomienda el uso de una pistola de calor para hacer adaptaciones o correcciones a la férula una vez aplicada.
- Como no hay agua implicada en el proceso, habrá menos riesgo de contaminación.
- El calentador seco y la lámina de Teflón necesitan un mantenimiento mínimo.



CALENTADOR SECO

N.º de art.	Descripción	Voltaje	Región/País
32501/230EU	Calentador Seco	230V	EU
32501/230UK	Calentador Seco	230V	UK
32501/110US	Calentador Seco	110V	USA
32501/14	Lámina de Teflón individual	N/A (no aplicable)	Todo

RECURSOS DE AYUDA DE INSTRUCCIONES SOBRE FÉRULAS

THE SPLINTING GUIDE (La guía sobre férulas)

21021E

Compilada por Paul Van Lede OT, MS.

- Férulas estáticas para mano.
- Férulas dinámicas para mano.



DVD - A VISUAL GUIDE TO PERFECT ORFIT SPLINTS (Una guía visual de las férulas Orfit perfectas)

21089

Contiene:

- Ortesis inmovilizadora de la zona volar de la muñeca
- Ortesis circunferencial de codo
- Ortesis para el "cuello de cisne"
- Ortesis para la "mano en garra"
- Ortesis para muñeca y pulgar de Orfilight
- Ortesis para muñeca y pulgar
- Ortesis posterior tipo guante precortada para pulgar
- Ortesis para muñeca y pulgar de Orfit Colores
- Ortesis para mano en reposo
- Ortesis Orfizip
- Ortesis circunferencial para muñeca
- Orficast



INSTRUCCIONES DE USO

CONSEJOS ÚTILES PARA TRABAJAR CON LOS MATERIALES PARA FÉRULAS ORFIT

1. Al usar Orfit® Classic, agregue jabón al recipiente en donde se calienta para hacerla menos adhesiva.
2. Frote el material seco con polvo de talco antes de calentarlo.
3. Controle la temperatura del agua: ¡no sobrecaliente el material!
Las temperaturas ideales son 65°- 70 °C (149° - 158 °F). (a excepción del producto Crystal, a 80 °C – 176 °F)
4. ¡No seque materiales no revestidos sobre una mesa o una toalla!
5. Estire para aprovechar plenamente el material.
6. Permita que el material se vuelva completamente transparente antes de moldearlo (si corresponde).
7. Utilice el automoldeable para una mayor ventaja en el moldeo.
8. Utilice la adhesividad para moldear contra la gravedad.
9. Corrija la forma y recorte los bordes antes de que se complete el endurecimiento.
10. Utilice materiales revestidos para hacer férulas que se unen a sí mismas en forma temporal, como en el caso de los diseños circunferenciales. Al enfriarse, se pueden separar.
11. Utilice materiales “pegajosos” o adhesivos para accesorios y uniones excelentes.
12. Visite www.orfit.com para obtener información más detallada sobre cada material de ferulaje específico de Orfit®.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE SUS FÉRULAS

Debe limpiar diariamente las férulas fabricadas con materiales ORFIT®.
Utilice agua tibia y jabón líquido, detergente biológico o pasta dental, y enjuague bien.

Nunca utilice solventes.

Evite los detergentes ácidos.

No es posible la esterilización de las férulas ORFIT® en una autoclave.

Es posible la desinfección con alcohol, amonio cuaternario o una solución de jabones de desinfección disponibles en forma comercial (HAC®, Sterilium®, etc.). Después de usarlas, las férulas se pueden desechar con los residuos normales del hogar sin dañar el medio ambiente. Los productos ORFIT® son biodegradables.

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

	Pagina	Temperatura de activacion	Transparente cuando activado	Tiempo de moldeado
Cinta Termoplástica Orficast™	4	65°C-149°F	no	1.0-1.5 minutos
Orfit® Classic Blanda	8	65°C-149°F	si	1- 2 minutos
Orfit® Classic Rígida	8	65°C-149°F	si	2-3 minutos
Orfit® NS Blanda	10	65°C-149°F	si	1- 2 minutos
Orfit® NS Rígida	10	65°C-149°F	si	2-3 minutos
Aquafit™ NS Blanda	12	65°C-149°F	si	1-2.5 minutos
Aquafit™ NS Rígida	12	65°C-149°F	si	1.5-2.5 minutos
Orfilight®	14	65°C-149°F	no	1-2.5 minutos
Orfilight® Negra NS	14	65°C-149°F	no	1-2.5 minutos
Orfilight® Azul Atómica NS	16	65°C-149°F	no	1-2.5 minutos
Orfit® Colores NS	18	65°C-149°F	no	1-3.5 minutos
Orfit® Eco	26	65°C-149°F	no	1-3 minutos
Orfit® Eco Negra NS	28	65°C-149°F	no	1-3 minutos
Tecnofit®	30	65°C-149°F	si	1-3 minutos
Orfibrace™	32	65°C-149°F	no	1-2 minutos
Orfit® Flex	34	65°C-149°F	no	1.5-3 minutos
Orfit® Ease	36	65°C-149°F	no	1-2.5 minutos
Orfizip® NS	40	65°C-149°F	si	1.5-2 minutos
Orfizip® Negra NS	40	65°C-149°F	no	1.5-2 minutos

Tiempo de endurecimiento	Resistencia al estiramiento	Memoria	Capacidad de moldeado	Revestimiento antiadherente
3-3.5 minutos	moderada	completa	elevada	no
1-6 minutos	moderada	completa	moderada	no
6-10 minutos	elevada	completa	baja	no
2-6 minutos	moderada	completa	moderada	sí
6-9 minutos	elevada	completa	baja	sí
3-6 minutos	moderada	completa	moderada	sí
8-9.5 minutos	elevada	completa	baja	sí
2-4 minutos	moderada	elevada	moderada	no
2-4 minutos	moderada	elevada	moderada	sí
2-4 minutos	moderada	elevada	moderada	sí
3.5-9 minutos	moderada	completa	moderada	sí
4-6 minutos	elevada	moderada	baja	no
4-6 minutos	elevada	moderada	baja	sí
2.5-5.5 minutos	elevada	completa	baja	no
5-6 minutos	elevada	moderada	baja	sí
4.5-7 minutos	baja	baja	elevada	no
2-6 minutos	moderada	baja	elevada	no
6-7 minutos	moderada	elevada	moderada	sí
6-7 minutos	moderada	elevada	moderada	sí

ENCUENTRE ORFIT EN LÍNEA: WEB Y REDES SOCIALES

NUESTRA PÁGINA WEB Y BLOG

La **página web** de Orfit Industries es una fuente rica de información valiosa y útil. Contiene información sobre todos los productos y accesorios, así como las instrucciones de uso de nuestros materiales. También tiene acceso a nuestro rincón educativo (www.orfit.com/educational-corner), donde encontrará diseños de férulas y vídeos instructivos. La lista de todos los talleres y conferencias en las que estaremos presentes se encuentra también en la página web.

Nuestro **blog** es el núcleo de la información sobre productos, eventos y acontecimientos. Le invitamos a visitar el blog regularmente para encontrar actualizaciones en nuestros campos de especialización y para obtener nuevas ideas, noticias del sector y tener una visión del trabajo entre bastidores de Orfit Industries. www.orfit.com - blog.orfit.com



EL GRUPO ORFIT SPLINTING & REHABILITATION EN FACEBOOK

El grupo de Facebook Orfit Splinting & Rehabilitation Group se ha convertido en una comunidad donde terapeutas, distribuidores y miembros del equipo de Orfit comparten información. Los usuarios de los productos de ferulización Orfit de todo el mundo comparten ideas, debaten, hacen preguntas sobre casos y aprenden más cosas sobre la amplia gama de soluciones que los productos Orfit ofrecen.

Le invitamos a unirse al grupo mediante la suscripción en esta página: www.facebook.com/groups/Orfit.splinting

CONÉCTESE Y MANTÉNGASE INFORMADO



Haga clic en "me gusta" en las historias, fotos y noticias sobre Orfit Industries y nuestros productos.

www.facebook.com/orfit.industries



Síguenos en Twitter para recibir noticias y actualizaciones sobre Orfit Industries y los sectores en los que trabajamos.

www.twitter.com/orfit



Las novedades de Orfit Industries, los comunicados de prensa y las noticias relevantes del sector se pueden encontrar en nuestra página de LinkedIn. ¡Síguenos! www.linkedin.com/company/orfit-industries



En nuestro canal de YouTube podrá ver todas las películas de nuestra empresa y vídeos instructivos. ¡Suscríbase a nuestro canal!

www.youtube.com/user/OrfitIndustries

Queremos animarle a participar personalmente en las redes sociales. Agradeceríamos que se uniera a nuestro grupo de Facebook Splinting & Rehabilitation Group y participara activamente en los debates. Si tiene preguntas, comentarios o quiere contribuir con información en nuestras redes sociales, puede ponerse en contacto con nuestra asistente en medios sociales y comunicaciones en línea, Isabelle Vanpeel, en isabelle.vanpeel@orfit.com.

NOTAS

A series of horizontal lines for taking notes, consisting of 18 rows. Each row is defined by a solid orange line on the left and a dotted line extending across the page.





ORFICAST
•
ORFIT CLASSIC
•
ORFIT NS
•
AQUAFIT NS
•
ORFILIGHT
•
ORFIT COLORES NS
•
TIRAS ORFIT
•
ORFIT ECO
•
TECNOFIT
•
ORFIBRACE
•
ORFIT FLEX
•
ORFIT EASE
•
ALLFIT
•
ORFIZIP
•
DYNASYST



IMPRESIÓN DE BAJO IMPACTO
FSC Consejo de Administración Forestal

Uit goed beheerde bossen.
Cert no. SGS-COC-403477
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

ESTE FOLLETO SE HA IMPRESO EN PAPEL
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.
LAS TINTAS EMPLEADAS SON BIODEGRADABLES.
SE HA UTILIZADO UN MÍNIMO DE ADITIVOS Y ALCOHOL.



ORFIT Industries • Vosveld 9A • B-2110 Wijnegem • Bélgica
Teléfono: (+32) (0) 3.326.20.26 • Fax: (+32) (0) 3.326.14.15
Correo electrónico: welcome@orfit.com • www.orfit.com



scan.me/gnskjp

25-06-2015

Art.Nr:3503BES

Reservados todos los derechos. Queda prohibido reproducir, almacenar en un sistema de recuperación o transmitir de cualquier modo y forma, ya sea electrónico, mecánico o por fotocopia, parte alguna de esta publicación sin el consentimiento previo por escrito de Orfit Industries.